


# AdaptDx<sup>®</sup> PRO<sub>X</sub> Guía de configuración

## I Desembalaje

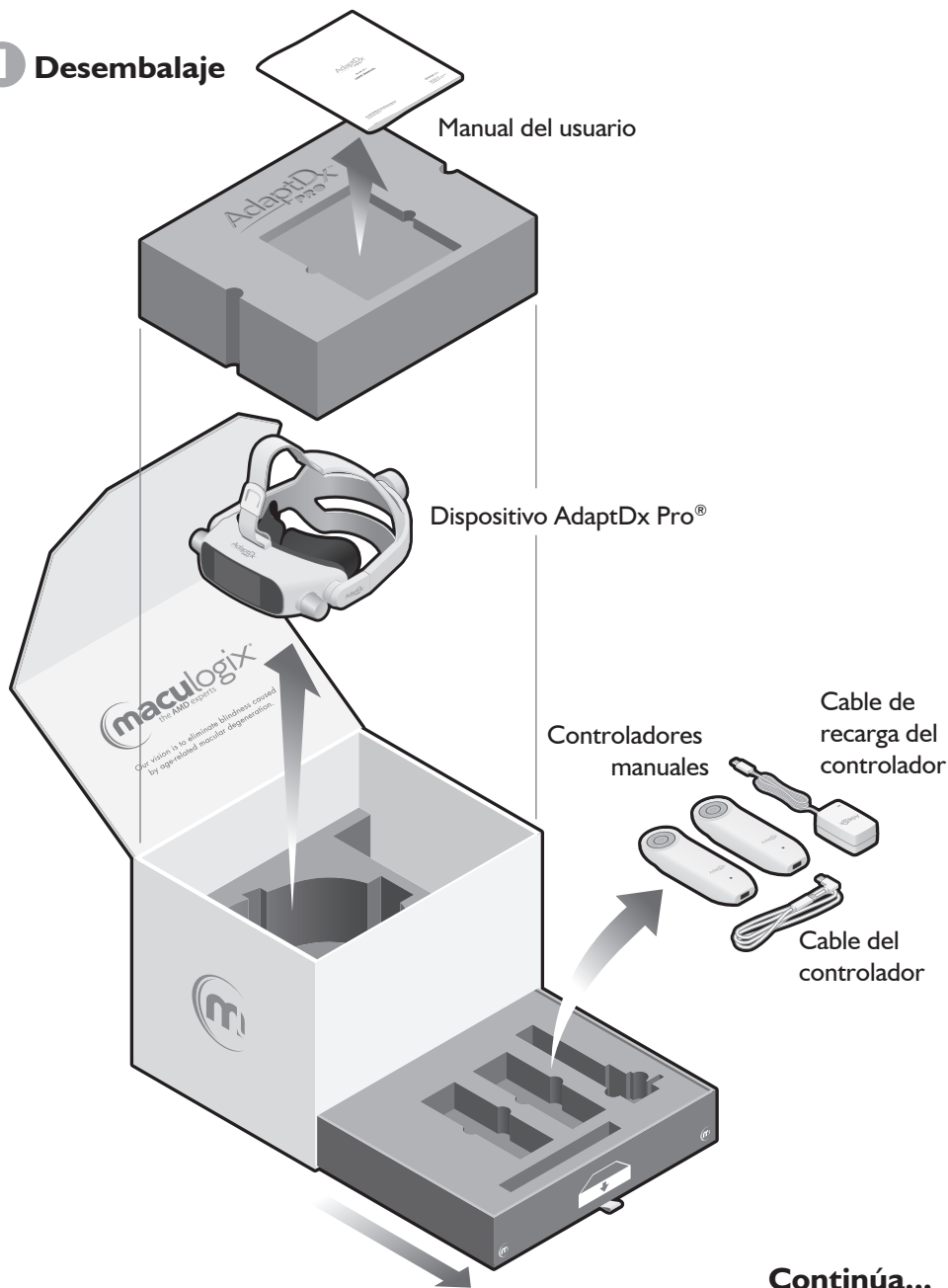


Continúa...

**La gestión de la fuente de alimentación es vital para realizar pruebas uniformes sin problemas.**


- El sistema AdaptDx Pro incluye dos controladores manuales.
- Cada controlador tiene una batería recargable que proporciona alimentación al casco.
- Cargue por completo un controlador de mano antes de configurar el AdaptDx Pro.
- Debe haber un controlador cargado firmemente conectado al casco, que debe permanecer conectado en todo momento, incluso cuando se almacene.

**El otro controlador debe dejarse en el cargador de pared hasta que se cambie por el agotado del casco.**


## 2 Recarga completa del controlador

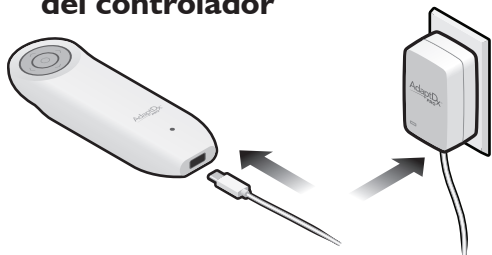

## 3 Conexión del controlador al casco

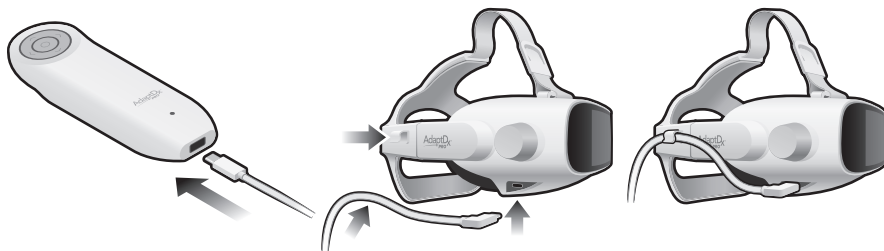


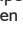
## 4 Encendido

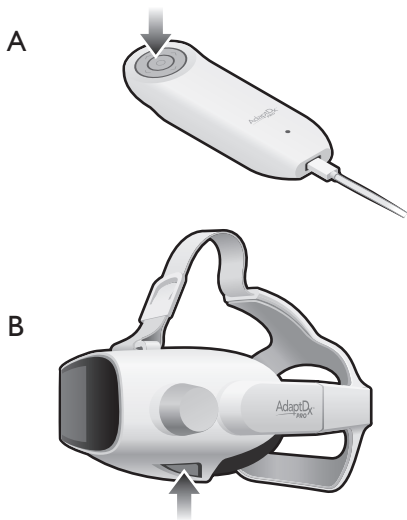


## 5 Configuración de la conexión wifi



Seleccione el icono «Herramientas del sistema»  en la parte superior de la pantalla. Desplácese por las opciones de configuración y elija «Seleccionar red».

- El indicador de wifi de la esquina superior derecha se iluminará en amarillo  si el dispositivo no está conectado.

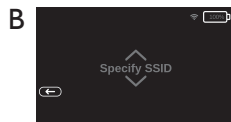


- Desplácese por las redes disponibles con las flechas hacia arriba y hacia abajo y elija la red deseada.



- A continuación, introduzca la contraseña de la red seleccionando los caracteres con las flechas hacia arriba y hacia abajo.

- Vaya al botón «Intro»  para guardar la contraseña.



- El indicador de wifi se volverá verde  cuando el dispositivo esté conectado.

Para hacer un pedido de piezas de recambio, visite [store.maculogix.com](http://store.maculogix.com) o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente llamando al +1.888.392.6801

Ref.: 10644-Spanish Guía de configuración  
PRO-LBL-10644-Spanish Guía de configuración de AdaptDx Pro (Rev. 4)  
© 2021 MacuLogix, Inc.

**maculogix**  
THE AMD experts

MacuLogix®, Inc.  
1000 Kreider St. Ste 700  
Middletown, PA 17057