


AdaptDx^{PRO} Guide de configuration

I Déballage

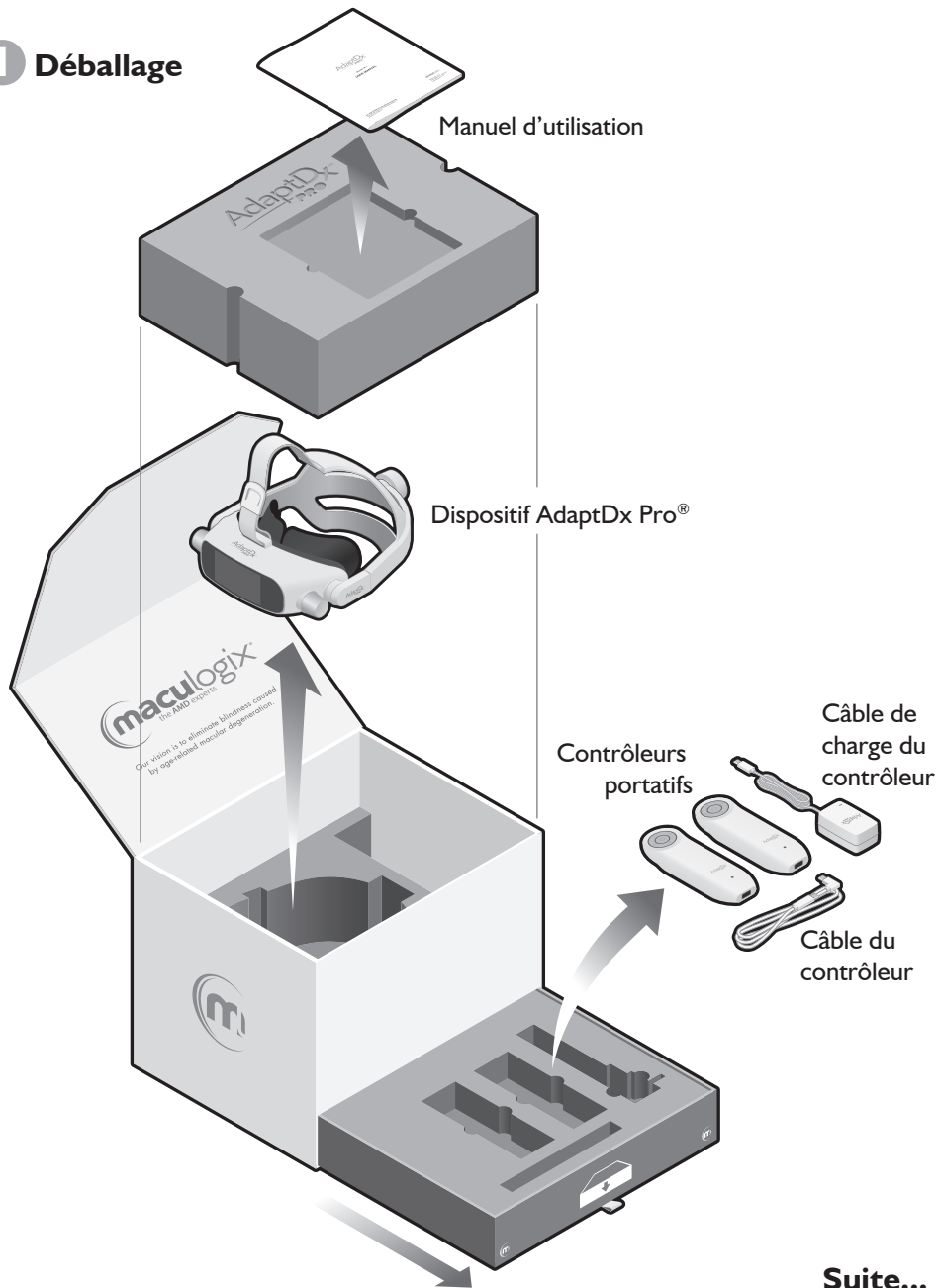


Suite...

La gestion de l'alimentation électrique est essentielle pour garantir des tests cohérents et sans incident.


- Le système AdaptDx Pro est livré avec deux contrôleurs portatifs.
- Chaque contrôleur est doté d'une batterie rechargeable qui alimente le casque.
- Charger complètement un des contrôleurs avant de configurer l'AdaptDx Pro.
- Un contrôleur chargé doit être raccordé solidement au casque à tout moment, même lorsque celui-ci est rangé.

Laissez l'autre contrôleur dans le chargeur mural jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de remplacer le contrôleur déchargé sur le casque.


2 Charger complètement le contrôleur

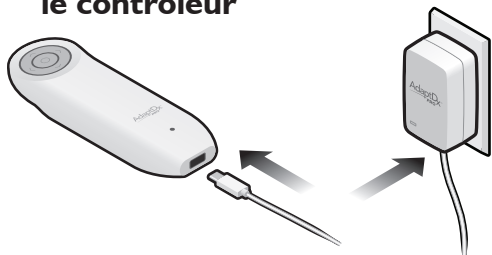

3 Raccordement du contrôleur au casque

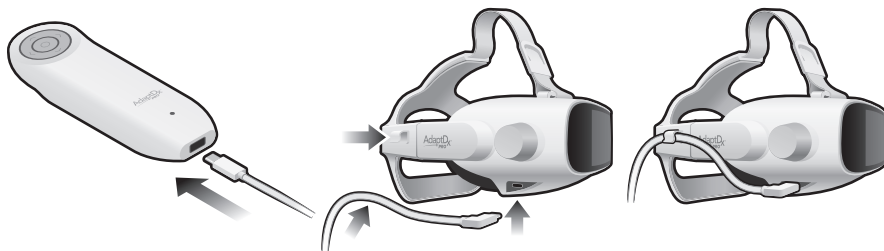

4 Mise sous tension

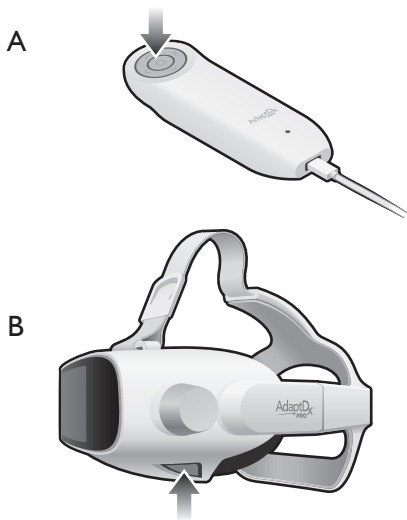


5 Configuration du WiFi



Sélectionnez l'icône « Outils système » en haut de l'écran. Faites défiler les options de configuration et choisissez « Sélection du réseau ».

- L'indicateur WiFi dans le coin supérieur droit s'affiche en jaune lorsque le dispositif n'est pas connecté.

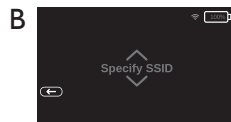

- Faites défiler les réseaux disponibles en utilisant les flèches haut et bas et choisissez le réseau souhaité.



- Ensuite, saisissez le mot de passe du réseau en utilisant les flèches haut et bas pour sélectionner chaque caractère.



- L'indicateur WiFi s'affiche en vert lorsque le dispositif est connecté.

Pour commander des pièces de rechange, visitez le site store.maculogix.com ou contactez le service clientèle au 1.888.392.6801.

Réf : 10646-French Guide de référence rapide AdaptDx Pro
PRO-LBL-10646-French Guide de référence rapide AdaptDx Pro (rév. 4)
© 2021 MacuLogix, Inc.

- Naviguez jusqu'au bouton « Entrée » pour enregistrer le mot de passe.

maculogix
the AMD experts

MacuLogix®, Inc.
1000 Kreider St. Ste 700
Middletown, PA 17057, États-Unis