



GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDA

Ambiente di prova consigliato

- Condurre il test in un ambiente tranquillo e privo di distrazioni.
- Fornire al paziente una sedia confortevole e un tavolino.

1. Accensione di AdaptDx Pro[®]

- Premere il pulsante sul telecomando per attivare la batteria.
- Premere il pulsante di accensione sul lato sinistro sotto lo schermo LCD.

2. Preparazione di AdaptDx Pro per il test

- La schermata principale mostra le impostazioni predefinite per il test.
- Usare il pulsante a cinque posizioni del telecomando per muoversi nella pagina, quindi selezionare il pulsante blu con la freccia bianca per procedere con il test.
- Per modificare le impostazioni predefinite, selezionare l'icona "Strumenti del sistema" nell'angolo in alto a sinistra dello schermo LCD. Compariranno delle frecce a sinistra e a destra per effettuare le selezioni desiderate. Per salvare e procedere con il test, fare clic sul pulsante blu con la freccia bianca.

SPIE SUL TELECOMANDO

Verde fisso = Carica completa

Telecomando pronto all'uso


Verde lampeggiante = Carica bassa

Carica sufficiente a eseguire un solo test

Arancione lampeggiante = Carica in esaurimento


Carica non sufficiente a eseguire il test

SCHERMATA PRINCIPALE

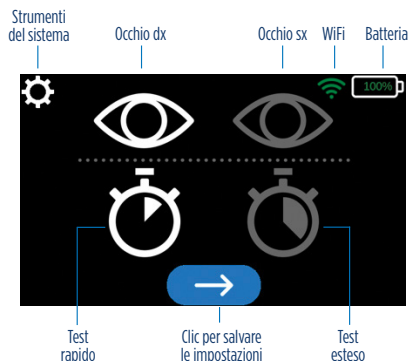

3. Preparazione del paziente e regolazione della messa a fuoco

- Una volta completata la configurazione del test, sullo schermo LCD comparirà un'animazione che fornirà istruzioni passo passo su come far indossare il visore al paziente e regolare la messa a fuoco.

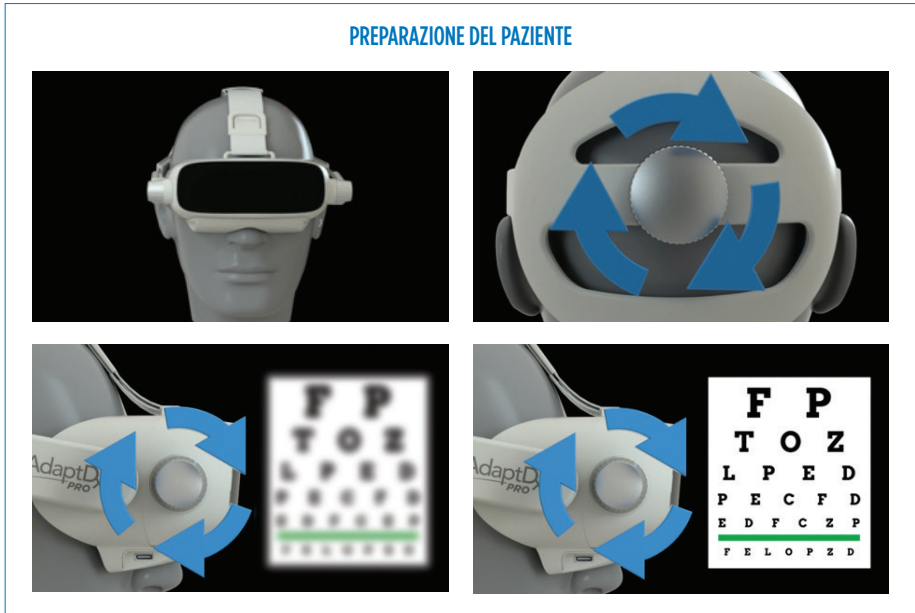


4. Progressione del test

- Theia™, l'assistente virtuale, si presenterà al paziente e gli spiegherà brevemente in cosa consisterà il test, ovvero:
 - dopo la presentazione, misurazione della pupilla e fissazione;
 - dimostrazione dello sbiancamento;
 - dimostrazione dello stimolo;
 - somministrazione del test.




5. Verifica dei risultati

- Il Rod Intercept® (RI®) è il tempo in minuti necessario a completare il recupero dell'adattamento al buio.
- L'errore di fissazione è la percentuale di volte in cui il paziente genera soglie non valide.
- Il test non è valido quando:
 - il paziente ammicca o distoglie lo sguardo durante lo sbiancamento;
 - il tasso di fissazione è del 30% o superiore.
- In caso di test non valido, è possibile esaminare l'altro occhio del paziente immediatamente, oppure aspettare 30 minuti, quindi ripetere il test dello stesso occhio.

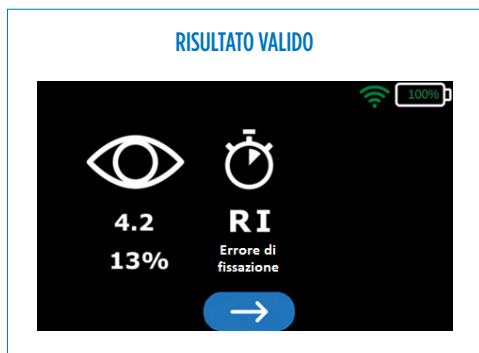

6. Eliminazione dei risultati del test

- Una volta completato il test, è consigliabile sempre trascrivere i risultati.
 - I risultati da trascrivere sono: occhio esaminato (OS o OD), protocollo del test (rapido o esteso), Rod Intercept e tasso di errore di fissazione.
 - Una volta eliminato, il test non può più essere recuperato.
- Selezionare il pulsante blu con la freccia bianca per aprire la schermata di eliminazione del test.
- Selezionare l'icona per eliminare il test. Per procedere con un altro test è necessario eliminare quello corrente.

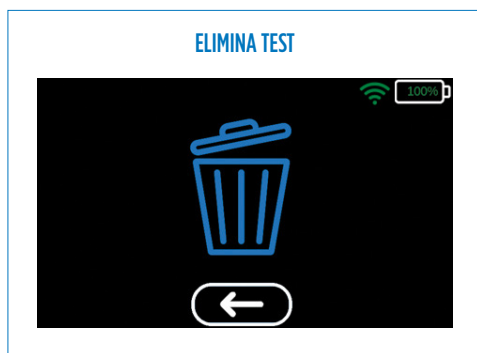

Pulizia

- Evitare di immergere il sistema AdaptDx Pro in liquidi, né di spruzzare, versare o rovesciare liquidi su di esso.
- Si consiglia di pulire regolarmente i punti di contatto con il paziente, ovvero:
 - oculari avvolgenti;
 - rivestimento imbottito;
 - cinghia regolabile;
 - telecomando;
 - cavo del telecomando.
- Si consiglia di pulire con salviette imbevute di alcol isopropilico.
- Pulire le finestre del visore delicatamente con un panno per lenti e/o aria compressa.



Recapiti

Servizio clienti: contattare MacuLogix al numero + I 888-392-6801

Per ordinare parti di ricambio, visitare il sito store.maculogix.com o contattare il Servizio clienti al numero + I 888-392-6801